

침대저울

UNDER BED SCALE

사용용도 및 사용방법

- 신부전증 환자 투석 시 체중 측정용
투석기 오류 검증용
- 체중 변화 측정용 - 실시간 감시
- 침대 바퀴에 끼워 사용

특징

- 시작체중과 종료체중, 체중변화량을 실시간으로 모두 표시
- 두랄루민으로 제작되어 가볍고 이동이 간편
- 4.3인치 컬러 TFT LCD & 터치 패널 채용





SPECIFICATIONS

MODEL	CKUBS-II
최대중량	600kg
정밀도	0.1kg
재질	두랄루민
Scale 중량	약 6.6kg x 4 ea = 26.4 kg (scale)
Stand 중량	약 18.3kg / 1580(H)mm
규격	240(W)mm x 170(L)mm x 140(H)mm

사용법

- 침대 바퀴에 끼워 사용

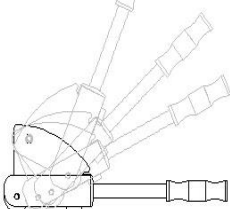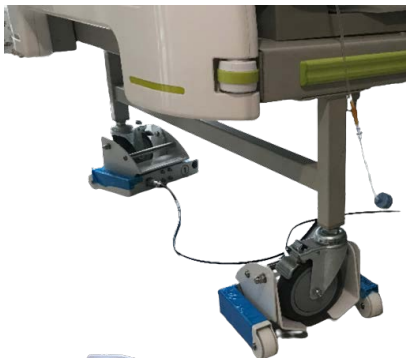

- bed lift 기능(침대에 손을 대지 않고
침대바퀴에 설치하는 기능)

4.3인치 컬러 TFT LCD & 터치 패널 채용



가속도 센서 내장으로 DISPLAY 방향 변경 가능

표시 부	4.3인치 컬러 TFT LCD & 터치 패널
케이스 재질	ABS 플라스틱
저울 연결 방식	디지털 전송 박스 (ADJ-4)
무선 방식	블루투스 무선 통신 (BLE 5.x)
USB	메모리 백업 및 펌웨어 업그레이드 용
실내 무선 범위	최대 30m
배터리	18650 리튬이온 배터리 2개
배터리 사용 시간	약 20시간
충전기	SMPS 12VDC, 2A
사용 온도	-20°C ~ 60°C
사용 습도	85% R.H. (no condensation)
제품 무게	0.4kg

12345678 2017.12.25 PM 10:13					
3/7	날짜 및 시간	시작체중	완료체중	체중변화	시작변화
15	17.12.25 13:10	51.00 kg			
16	17.12.25 13:40	51.00 kg			
17	17.12.25 14:10	51.05 kg			0.05 kg
18	17.12.25 14:15	51.05 kg	49.00 kg	- 2.05 kg	
19	17.12.25 14:40	49.00 kg			- 2.05 kg
20	17.12.25 15:10	49.10 kg			0.10 kg
21	17.12.25 15:40	49.10 kg			
[위/아래] 키로 저장된 데이터를 검색할 수 있습니다.					
삭제		전체삭제		위	아래
				취소	

최근에 저장된 7개의 데이터가 표시되며 [위/아래]키를
이용하여 총 50개의 저장된 자료를 검색 할 수 있습니다.